

Motiva Flora® ポートロケータ

クイックリファレンスガイド


www.motiva.health




リントフリーの綿布で洗浄と消毒を行います。研磨剤や溶剤は絶対に使用しないでください。




ボタンを押してポートロケータの電源をオンにします。白色のライトリングが点灯したら離します。

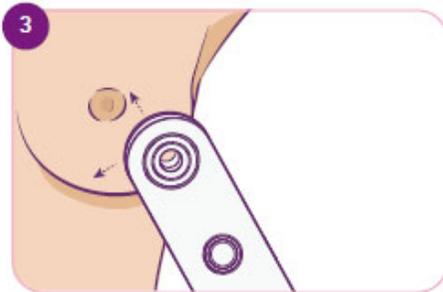


デバイスの上部を乳房に近づけて、デバイスを動かしながら注入ポートの位置を探します。

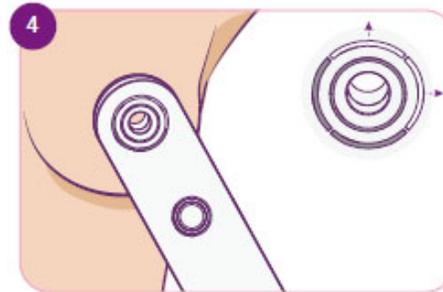


白色のライトが点灯して、ポートの位置に近づいたことを知らせます。

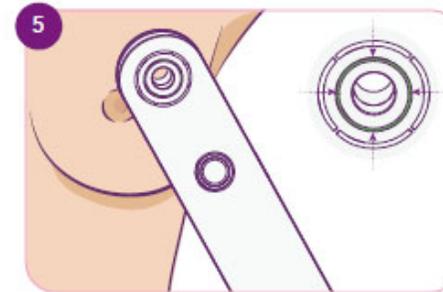


注入ポートの位置に来ると緑色のライトが点灯します。

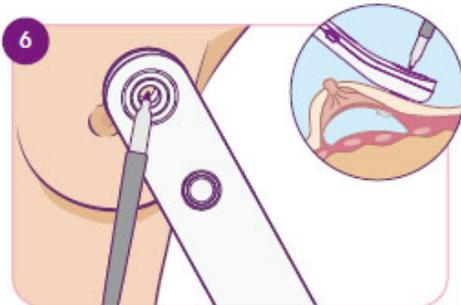

デバイスが動かないように注意して、開口部から垂直にサージカルマーカーを差し込み、乳房の注入部位をマーキングするか、デバイスを強く押し込んで皮膚に一時的なくぼみを作ります。

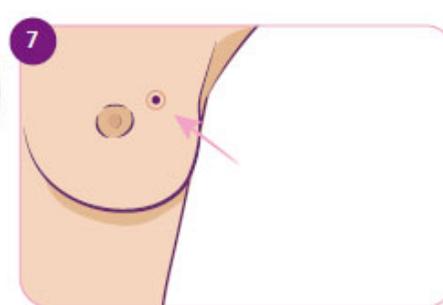

Motiva Flora® ポートロケータを乳房から離し、マーキングした位置または皮膚のくぼみの中心部分を目安に注射部位を決定します。

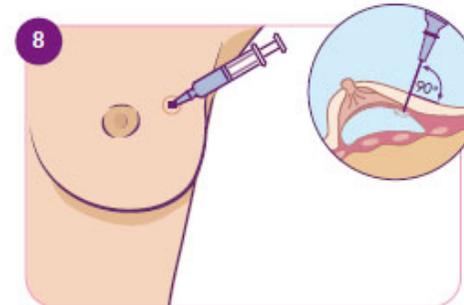

乳房から 90 度の角度で針を挿入し、ティッシュ・エキスパンダーに滅菌済生理食塩水を充填します。


その他の機能についてはこのガイドの裏面をご覧ください。

Motiva Flora®ポートルケーター

クイックリファレンスガイド

www.motiva.health

ユーザーインター
フェース
色の説明

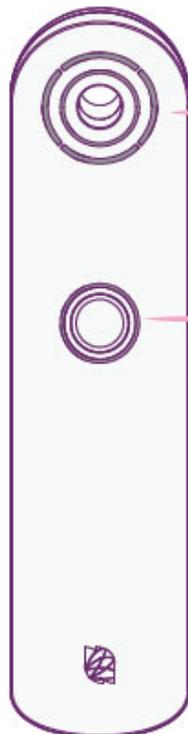

デバイスがオン、ポートの位置特定			電池の状態			危険
オン	ポート位置 特定中 白色で点灯	ポート位置 特定完了 緑色で点灯	残量低下	充電中	充電済み	アラート
白色で点灯	白色で点灯	白色で点灯	橙色で点滅	青色で点滅	青色で点灯	赤色で点灯

本デバイスを使用する前には、Motiva Flora®ポートルケーターの使用上の指示をお読みいただき、取扱方法の詳細をご確認ください。安全上の指示に従わなかった場合には、デバイスの損傷や患者の負傷につながるおそれがあります。このクイックリファレンスガイドは補足資料として作成されたものです。

ES Traducción disponible en las Instrucciones de Uso. DE Übersetzung in der Gebrauchsanweisung verfügbar. FR Traduction disponible dans le Mode d'emploi. NL Vertaling beschikbaar in de gebruiksaanwijzing. BG Превод е наличен в Насоките за употреба. HR Prijevod dostupan u Uputama za upotrebu. EL Η μετάφραση είναι διαθέσιμη στις Οδηγίες Χρήσης. CS Překlad je uveden v Pokynech pro použití. DA Oversættelsen kan findes i brugsanvisningen. SV Översättning finns i bruksanvisningen. HU A fordítás a használati utasításban található. IT Traduzione disponibile nelle istruzioni per l'uso. LV Tulkojums ir pieejams lietošanas instrukcijā. PL Tłumaczenie dostępne w instrukcjach użytkowania. PT Tradução disponível nas Instruções de Utilização. RO Traducerea este disponibilă în Instrucțiunile de utilizare. SK Preklad je k dispozícii v návode na použitie. SL Prevod je na voljo v navodilih za uporabo. KO 사용 지침에서 번역된 내용을 이용하실 수 있습니다. AR "تعليمات الاستخدام". TH มีคำแปลอยู่ในคำแนะนำการใช้. PT (BR) Tradução disponível nas Instruções de Uso. TR Çeviri Kullanma Kılavuzunda bulunmaktadır.